

# 医疗显示器安装指导


## 一、 安装环境

- 1) 操作系统: 支持 Windows XP 和 Windows 7 系统, 其他如 linux、定制操作系统不确保能够正常显示
- 2) 独立显卡: 为确保显示效果, 建议使用独立显卡。如果安装 2M 显示器, 且客户端主机已有 DVI 接口的独立显卡, 可以保留使用。其他型号需要使用产品标配的独立显卡。
- 3) 主机插槽: 确保主机显卡插槽为 PCI Express 2.0 16X


## 二、 Win 7 安装

### 1) 显卡安装


将光盘放入光驱中, 双击 autorun.exe, 运行安装程序

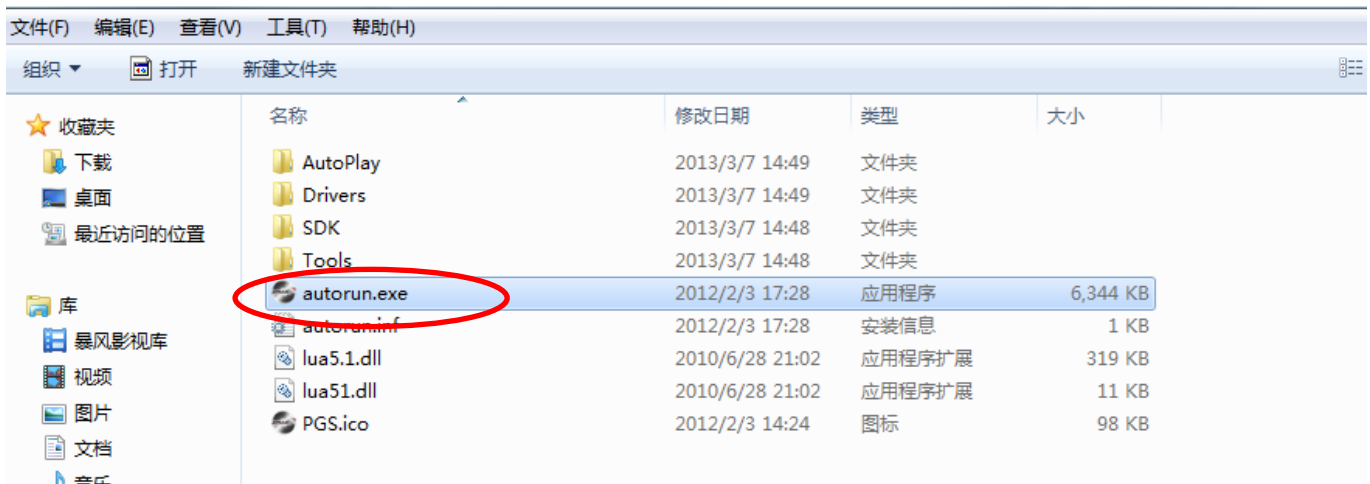


根据主机系统, 选择 WinXP 或 Win7, 32 位或 64 位的版本。按照提示顺序下一步完成驱动安装

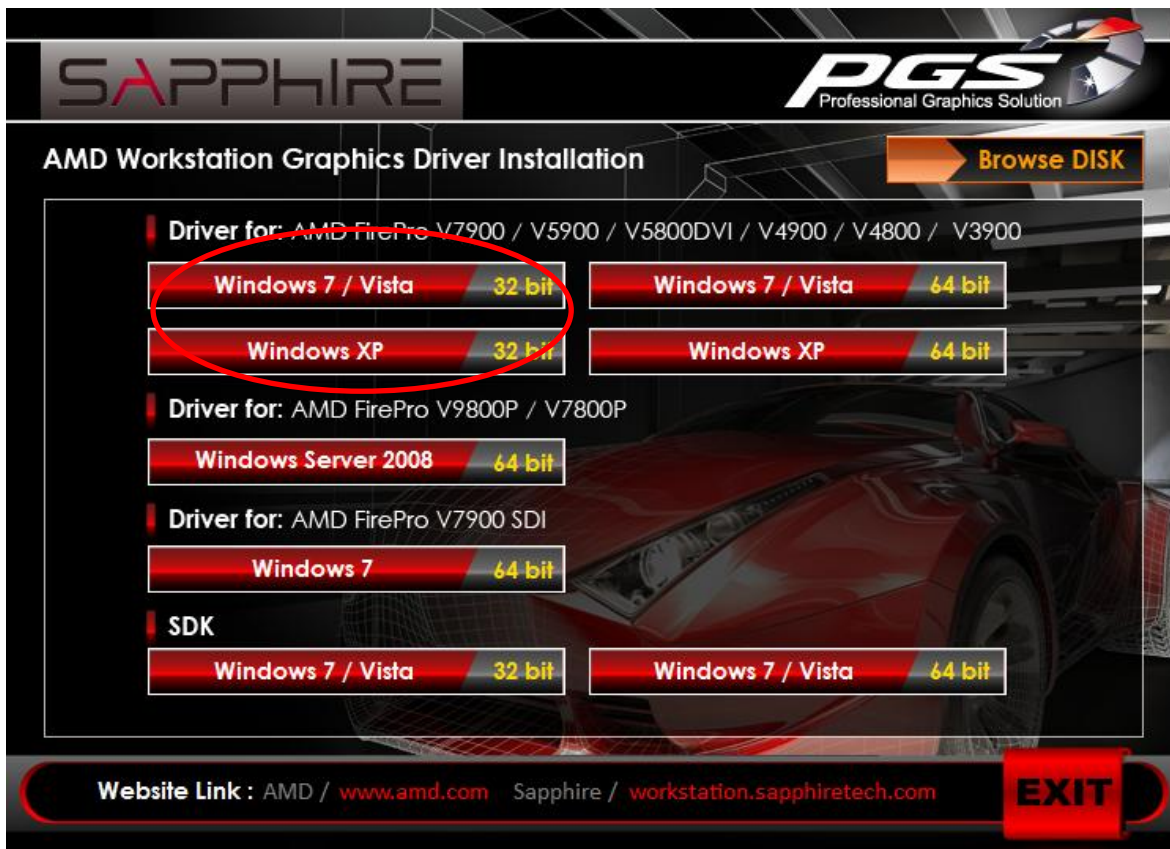


完成驱动安装后需按照提示重新启动电脑，之后查看安装结果是否正常。桌面上右键选择管理

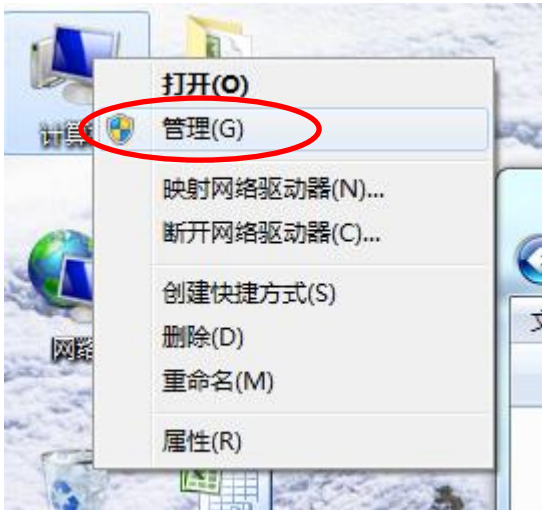

在设备管理器中查看显卡名称识别是否正常，硬件安装是否正常。如有异常，会有! 或? 的提示

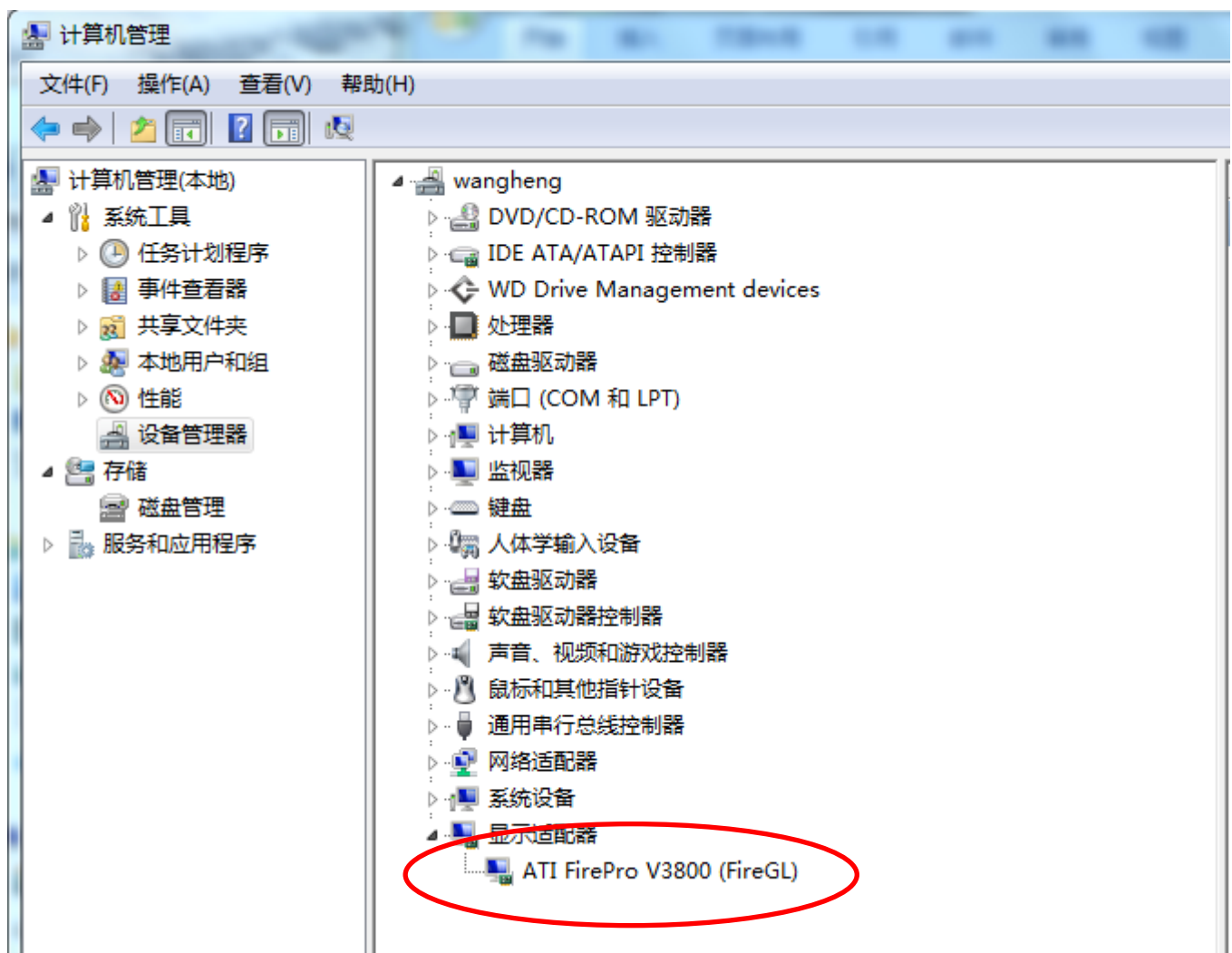


桌面上右键选择第一项显卡控制程序，应能正常响应

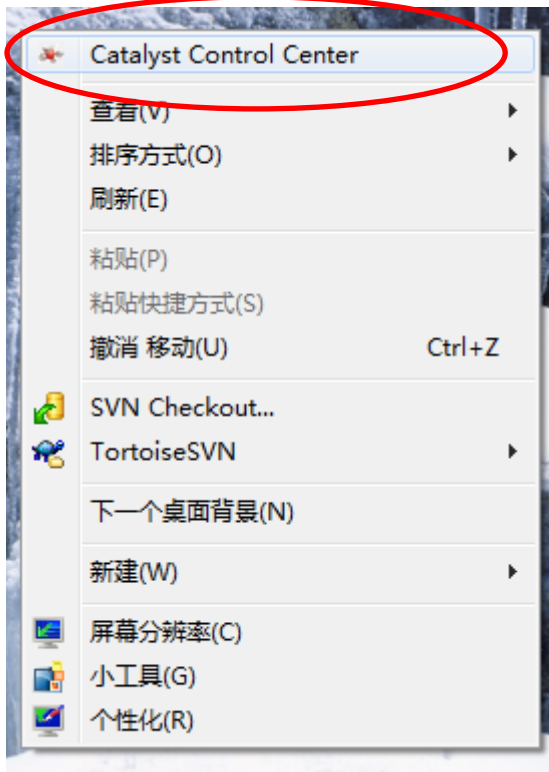

## 2) 使用设置

在桌面上右键选择屏幕分辨率

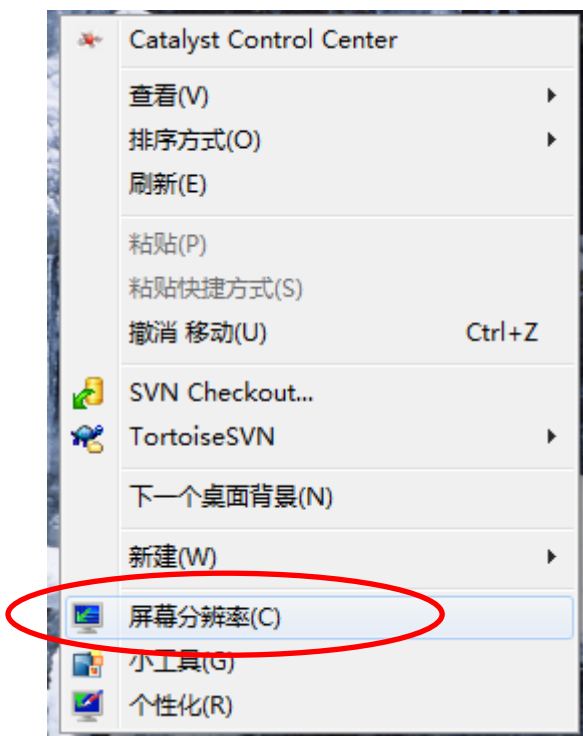





### 三、 Win XP 安装

#### 1) 显卡安装


将光盘放入光驱中，双击 autorun.exe，运行安装程序

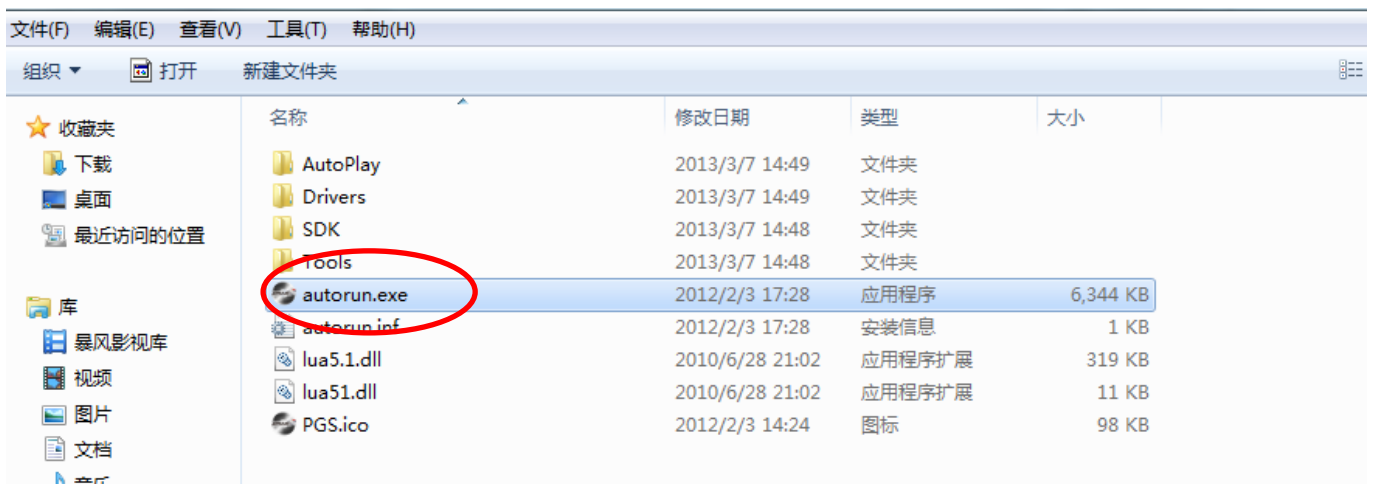


根据主机系统，选择 WinXP 或 Win7，32 位或 64 位的版本。按照提示顺序下一步完成驱动安装

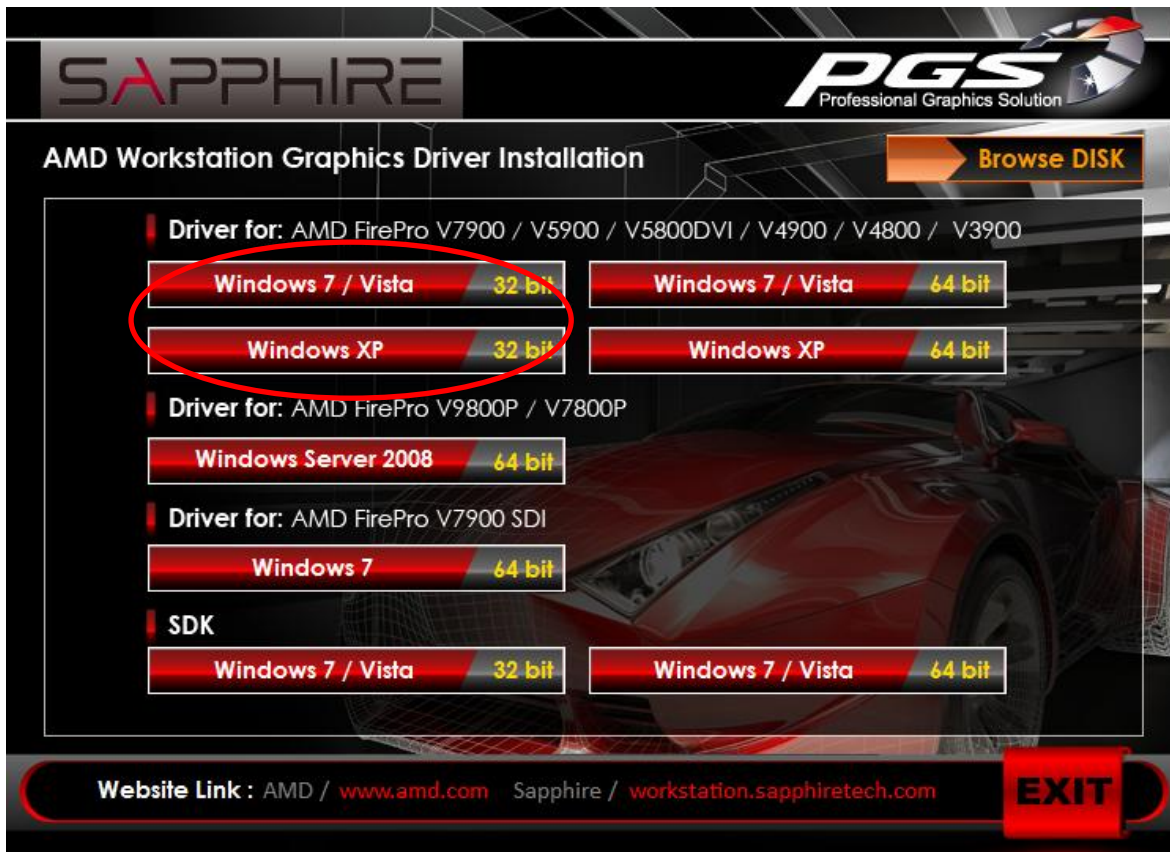

安装完成后查看驱动安装是否正常，在桌面上右键选择管理

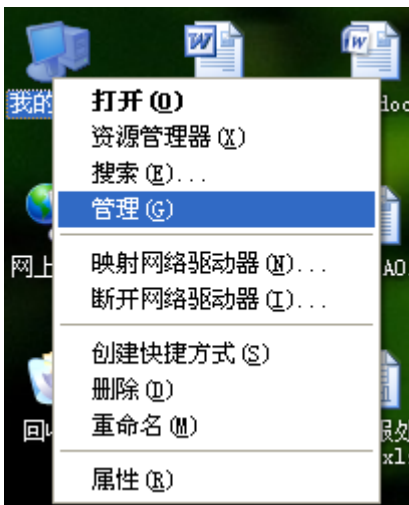

在设备管理器中查看显卡名称识别是否正常，硬件安装是否正常。如有异常，会有！或？的提示

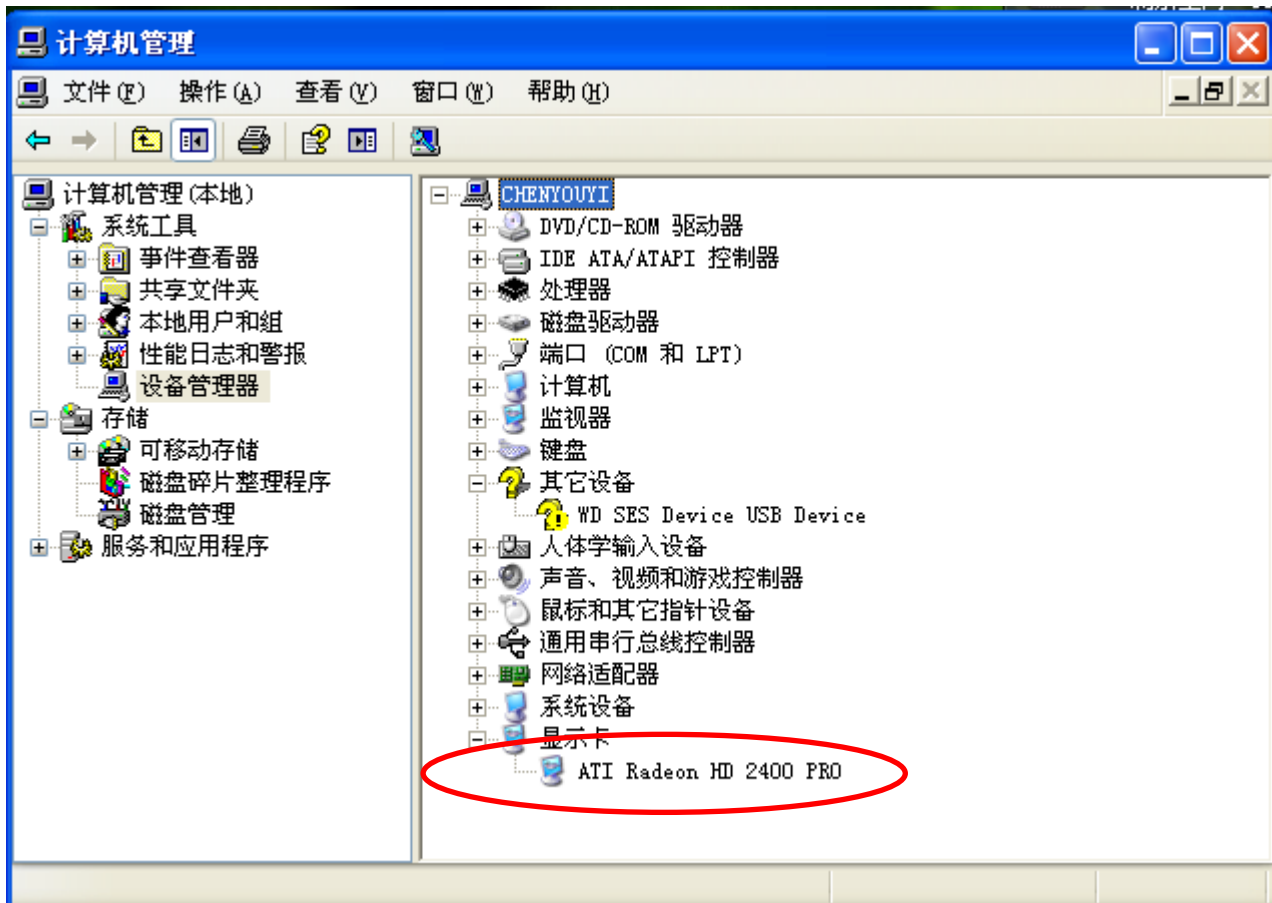

桌面上右键选择第一项显卡控制程序



显卡控制程序应能正常响应




## 2) 使用设置

调节分辨率：桌面上右键选择属性



在设置页面中选择合适的分辨率

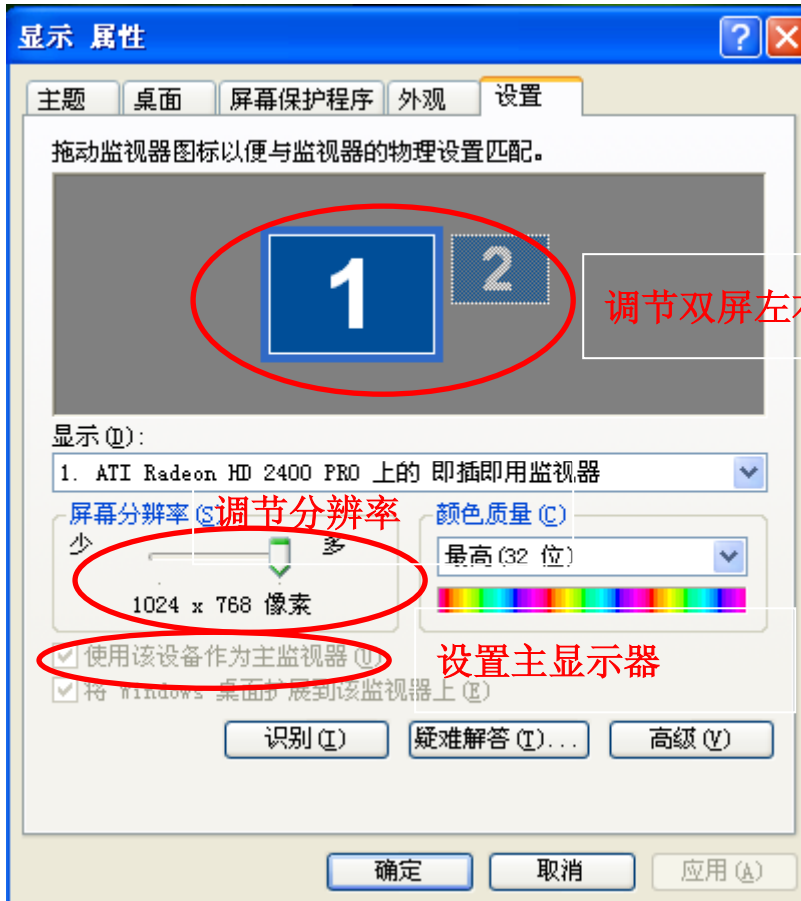

桌面右键选择第一项显卡控制程序，在显示器属性中调节旋转方向





## 四、 其他设置


### 1) 显示模式设置

桌面右键选择第一项显卡控制面板，在显示器属性页面中，可以右键选择主显示或者辅显示，进行复制、扩展，伸展模式的选择。



### 2) 5M 显示器安装

- a) 首先安装 ATI 光盘中的驱动程序
- b) 安装完成后放入光盘：V5800DVI 10-bit packed Pixel Driver  
根据操作系统，选择对应版本进行安装

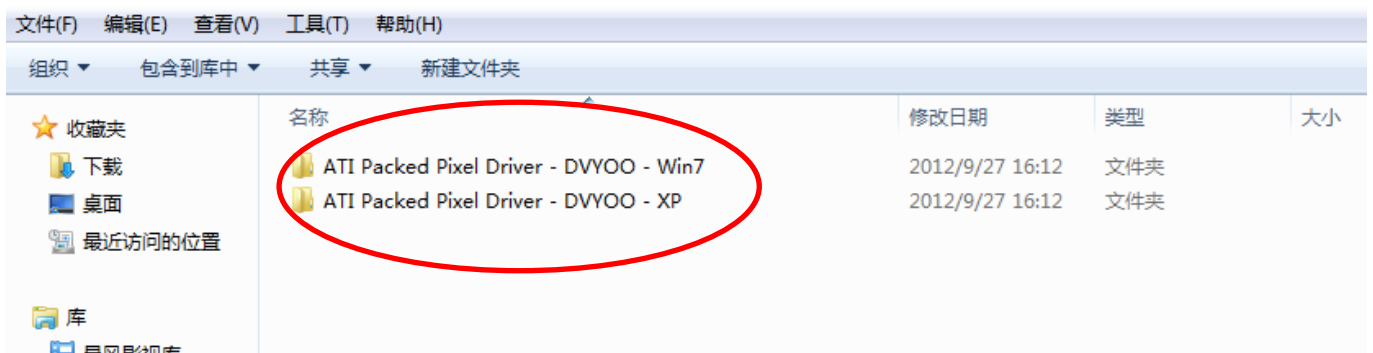

c) 补充驱动安装完成后，右键进入第一项显卡控制程序，启动 10 位像素格式支持。确定后即可调节到 5M 所用的 2560\*2048 分辨率

